

Handleiding

Trollimaster RA60



Version 1.5
Juni 2023



N.B. Deze rollator zal geïnstalleerd moeten worden door een competent persoon. Overschrijdt het gebruikersgewicht niet – hierdoor loopt men groot gevaar.

Voor gebruik

- Verwijder zorgvuldig alle verpakkingen. Vermijd het gebruik van messen of andere scherpe instrumenten, omdat dit het product kan beschadigen.
- Controleer het product voor eventuele zichtbare schade. Als u schade of verdachte fouten ziet verzoeken wij u geen gebruik te maken van het product, maar neem contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

Beoogd gebruik


De rollator is bedoeld voor personen die niet meer goed kunnen lopen zonder ondersteuning, een beperkte mobiliteit hebben, evenwichtsproblemen hebben of een operatie hebben gehad waardoor er extra ondersteuning nodig is om het evenwicht en de stabiliteit tijdens het lopen te behouden. De rollator kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Onderdelenlijst



- 1. Rugband
- 2. Handvatten
- 3. Remhendels
- 4. Tas
- 5. Frame
- 6. Achterwielen
- 7. Voorwielen
- 8. Zitting
- 9. In hoogte verstelbare frame
- 10. Verstelknop hoogteverstelling
- 11. Verstelschroef remmen

1. De handvatten met remmen monteren

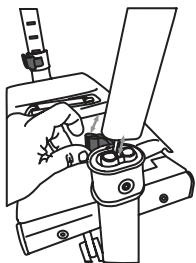


De rollator dient uitgeklaapt te zijn wanneer u begint. De rode clip dient geopend te zijn. Schuif nu de buis met het handvat in het frame. U kunt de buis enkel vergrendelen als de pin in de daarvoor bestemde uitsparing valt. De openingen in de buis moeten naar het midden wijzen.


Stel de gewenste hoogte in en sluit de rode clip op het frame. De clip zal een duidelijke 'klik' geven wanneer deze goed vastzit.

De gevolgen van een dergelijke aanpassing kunnen effect hebben op de stabiliteit.

2. De rugband monteren

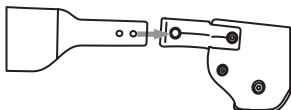


Schuif de rugband in de opening op de buis van het handvat. De zacht gevulde kant van de rugband dient naar de binnenkant te wijzen.

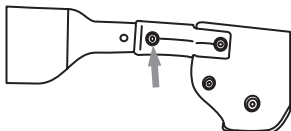


Zet de rugband vast door de schroef met de moet vast te draaien.


3. Het boodschappenmandje monteren

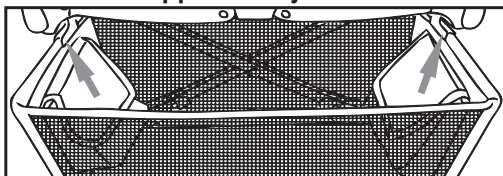

Schuif de haken van het mandje in de beugels onder de zitting.

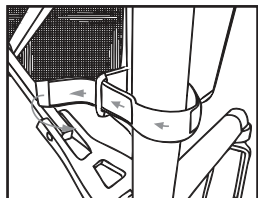


Doe de lus (klittenband) rondom het frame en haal door de opening van de sleuf.

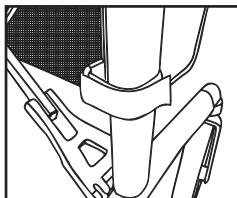


Zet hem zo strak mogelijk vast met het klittenband.

PAS OP: Belast het mandje niet te veel. Maximale belasting: 5 kg.


4. Gebruik van de remmen

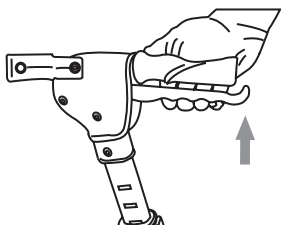

Druk de remmen geleidelijk in om af te remmen of om de parkeerstand eraf te halen.

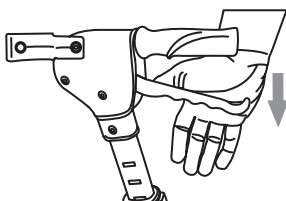

De remmen van uw rollator hebben een parkeerstand. Om de parkeerstand te bedienen duwt u beide remmen tegelijk naar beneden. U voelt de rem een lichte klik maken, de remmen staan nu in de parkeerstand.

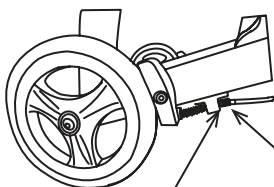


Stel de remspanning in door de verstelbare schroef vaster of losser te draaien. Met de slotbout zet u de gewenste stand vast.

Slotbout

Verstelbare schroef

5. In- en uitklappen van de rollator

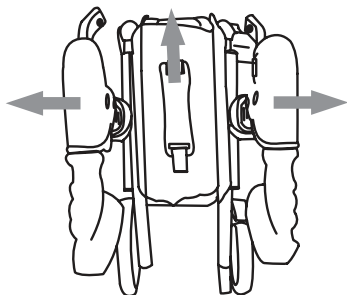


Om de rollator in te klappen trekt u het rode handvat op de zitting omhoog. De rollator klapt dan in elkaar.



Om de rollator uit te klappen trekt u de handvatten uiteen en drukt u op de zitting zodat de rollator volledig uitklapt.

Op de rollator gaan zitten.

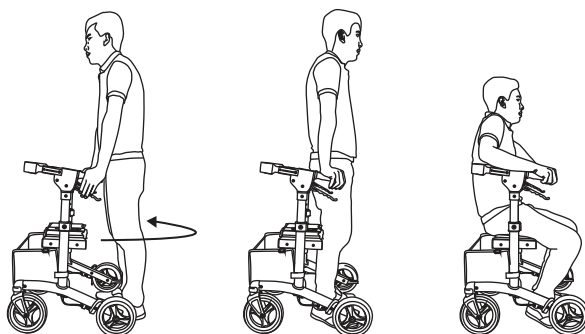

Voordat u op de rollator gaat zitten dient u de rollator altijd eerst op de parkeerrem te zetten. Dit doet u door de remhendels omlaag te duwen.

Ga niet met uw volledige gewicht op de rollator hangen wanneer u gaat zitten. Gebruik de handvatten om stabiel te blijven staan wanneer u voorzichtig omdraait. Houd de handvatten vast en laat u langzaam zakken en neem plaats op de rollator.

Tweedehands

Als u deze rollator tweedehands heeft gekocht vragen wij u de volgende onderdelen grondig te controleren voor uw eigen veiligheid.

Dit omvat een controle op:

- Gebogen of beschadigde buizen of scheuren in het frame.
- Losse of versleten klemmen.
- Of het in hoogte verstel systeem goed werkt.
- Losse handgrepen.
- Losse of versleten wielen en bevestigingsmiddelen.
- Gladde, versleten of gespleten rubberen onderdelen.

Vervang alle versleten, ontbrekende of beschadigde onderdelen waar nodig. In geval van twijfel, gelieve het product niet te gebruiken, maar onmiddellijk contact opnemen met uw leverancier voor service.


Zorg en onderhoud voor uw rollator.

1. Gebruik uw rollator alleen voor het doel waarvoor het bestemd is, steun bij het lopen. Het is de bedoeling dat uw rollator alleen wordt gebruikt op trottoirs, straat of in huis. Gebruik deze rollator niet op ruw terrein of grind. Gebruik van uw rollator op deze oppervlakken kan leiden tot ernstig gevaar voor uw veiligheid en kan schade aanbrengen aan de rollator.
2. Houd uw rollator schoon door deze af te vegen met een vochtige doek met een milde zeep. Veeg alle oppervlakken af met een droge doek. Gebruik in geen geval een schuurmiddel of reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen, aangezien dit de rollator ernstig zal beschadigen en uw garantie ongeldig maakt.
3. Gebruik met regelmaat WD40 op alle metalen bewegende delen waaronder het scharnier en de remmen.
4. Controleer regelmatig of alle wielen en het inklapmechanisme correct werken en of alle wielen vrij kunnen bewegen. Besteed bijzondere aandacht aan de voorwielen, zorg ervoor dat ze vrij en onbelemmerd kunnen draaien en dat ze stevig aan het frame zijn bevestigd.
5. Maandelijks controles: controleer of alle vergrendelpennen goed vastzitten. Controleer of er geen onderdelen los zitten. Controleer de afstelling van uw remmen. Controleer de zwenkwielen.
6. Monteer geen onderdelen of accessoires aan uw rollator die vervaardigd door een ander bedrijf. Wanneer u dit doet zal de garantie nietig worden verklaard en kunt u uw eigen veiligheid in gevaar brengen.




Label en symbolen

Product Label

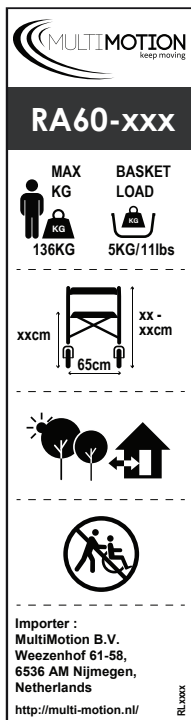

Symbol	Betekenis
	Maximale gebruikersgewicht
	Maximale belasting tas
	Gebruik NIET al seen rolstoel
	Buiten en binnen gebruik
	Fabrieksadres
	Productie datum
	Lees handleiding voor gebruik
	CE keurmerk
	Medisch hulpmiddel
	Authorized Representative
	Artikelnummer
	Lot/Batch nummer
	Waarschuwingen

Serie Label

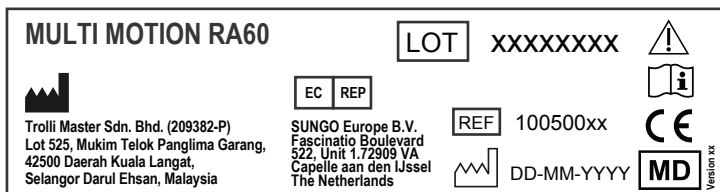

Service en garantie

De importeur stelt zich niet verantwoordelijk voor verwondingen aan de gebruiker of schade aan eigendommen, indien bij het gebruik van de rollator de aanbevelingen en waarschuwingen niet zijn opgevolgd. De rollator is, indien de omgangsregels zoals deze beschreven staan in deze handleiding worden opgevolgd, een uiterst veilig en stabiel product. Het is echter wel mogelijk dat, wanneer de gebruiksaanwijzingen niet correct wordt nageleefd, er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Op deze rollator zit een garantietermijn van 24 maanden. Neem voor garantie en service contact op met de gemachtigde dealer waar u uw product hebt gekocht. Hebt u na deze termijn van 24 maanden toch (technische) problemen met het product dan kunt u ook de gemachtigde dealer benaderen voor een eventuele oplossing.

Als het voorkomt dat u niet naar tevredenheid wordt geholpen wat betreft de garantie en service, stuurt u dan alstublieft een email naar MultiMotion afdeling klantenservice op het volgende e-mail adres: info@multi-motion.nl

Importeur:

MultiMotion B.V.
Weezenhof 61-58
6536 AM Nijmegen
The Netherlands
Tel. +31246794583

Authorized representative:

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7
2909 VA Capelle aan den IJssel
Netherlands

Fabrikant:

Trolli Master Sdn. Bhd.
Lot 525, Mukim Telok Panglima
Garang, Kuala Langat, 42500
Selangor, Malaysia